

Oplage: 1500 stuks

Wie is Entific Medical Systems?

Entific Medical Systems is de leverancier van BAHA hoortoestellen. Heeft u enkele jaren geleden een BAHA toestel gekregen, dan komt de naam Nobel Biocare u waarschijnlijk bekend voor. Tot 1999 bracht deze firma de BAHA hoortoestellen op de markt. Entific Medical Systems is opgericht met het doel de BAHA verder te ontwikkelen, en BAHA gebruikers meer service te bieden. Een service die naar ons idee op prijs gesteld zal worden is de BAHA nieuwsbrief.

Accessoires bij uw BAHA hoortoestel - de mobiele telefoon

De laatste tijd krijgen wij bij Entific Medical Systems regelmatig de vraag of het mogelijk is om met een BAHA hoortoestel met een mobiele telefoon te telefoneren. Het antwoord hierop is ja en nee. We zullen u in het kort proberen uit te leggen wat de (beperkte) mogelijkheden zijn. Personen die een BAHA toestel hebben van het type Classic of Cordelle, kunnen nogal eens last ondervinden van straling van de mobiele telefoon. Er zijn echter een aantal typen mobiele telefoontoestellen die geschikt gemaakt kunnen worden voor mensen met een BAHA hoortoestel. Op deze typen telefoons kan een inductielus (loopset LPS I) en een extra microfoontje aangesloten worden. Het betreft hier de Nokia 5110, 6110, 6130, 6150, 6210 en 7110. Sinds kort is er een nieuwere versie verkrijgbaar, de LPS II. De LPS II kan worden gebruikt in combinatie met een Nokia 3210, 8210, 8250 en 8850. Als kanttekening wordt echter wel vermeld dat het geluid van deze oplossing te wensen over laat. Dit laten wij echter graag aan u over om te beoordelen. Voor uitgebreidere gegevens is het raadzaam om bij een Nokia servicecentrum langs te gaan. U kunt daar alle informatie krijgen die u nodig heeft. Vraagt u naar de speciale GSM Loopset voor hoortoestelgebruikers. Gebruikers van een BAHA hoortoestel van het type "Compact" zijn wat dit betreft beter af. De BAHA "Compact" is minder gevoelig voor de straling die de mobiele telefoon uitzendt. Deze patiënten kunnen in principe met iedere mobiele telefoon bellen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de NVVS: www.nvvs.nl

Tip van de maand:

Als u leuke en / of handige tips heeft waar u misschien ook andere BAHA gebruikers mee kunt helpen, dan kunt u deze sturen naar Entific Medical Systems; Antwoordnummer 12049; 2300 VC in Leiden. In de volgende edities zullen wij u deze tips dan natuurlijk niet onthouden.

Vraag van een lezer:

Onlangs kregen wij de vraag van een BAHA gebruikster of het mogelijk blijft dat, nu zij een BAHA heeft, zij haar haar kan verven. Het antwoord hierop is ja. Houdt u er echter wel rekening mee dat er geen verf in de koppeling op de schroef

komt. Indien u (of de kapper) er bij het verven rekening mee houdt dat de koppeling op de schroef schoon blijft, is het verven van uw haar geen enkel probleem.

Er bereikte ons nog een tweede vraag, waarvan wij denken dat het belangrijk is dat u het antwoord weet. De vraag was: "Kan mijn schroef blijven zitten als ik een MRI scan moet ondergaan?". Het antwoord hierop is ja. Noch de schroef, noch de koppeling op de schroef (het abutment) hoeft verwijderd te worden.

"Onze" hond Barney:

In Australië werd in 2000 door Dr. Sue Sommerland de eerste BAHA aangemeten bij de witte labrador Barney. Barney kreeg als puppy een oorontsteking, en verloor daarbij zijn gehoor. In 2000, 6 jaar later, kreeg Barney zijn eerste BAHA toestel. Hij kan voor het eerst in jaren weer stemmen en geluiden horen. Zijn kwaliteit van leven is hierdoor aanzienlijk verbeterd. Zijn baasje had voor deze operatie veel geld over. Hij is blij dat Barney hem weer kan horen. Wel doet hij 's nachts Barney's BAHA af, zodat zijn hond ongestoord kan slapen. Ook zijn baasje zal meer rust hebben. Barney zal niet meer onafgebroken blaffen omdat hij zichzelf niet kan horen.



Hoe belangrijk zijn goede batterijen?

Het gebruik van goede batterijen is bijzonder belangrijk voor de geluidskwaliteit van uw BAHA toestel. De BAHA Classic geeft bijvoorbeeld een zwakker geluid als de batterijen bijna leeg zijn en de BAHA Compact gaat brommen en vervormen.

De consumentenbond heeft een batterijtest uitgevoerd. Wij geven u hieronder een overzicht van de bevindingen van de consumentenbond.

Voor alle duidelijkheid willen wij er graag nog bij vermelden dat u voor een BAHA Classic batterij "type 675" nodig heeft en voor een BAHA Compact batterij "type 13".

- 1) Waardering ZEER GOED:
- * Activar 13 HPX € 4,99 per verpakking ←
 - * Activar 675 HPX € 4,99 per verpakking
 - * Duracell DA 13 € 5,29 per verpakking ←
 - * Rayovac Proline 13 AP € 5,67 per verpakking ←
 - * Rayovac Proline 675 AP € 6,81 per verpakking
- 2) Waardering GOED: *niet verkrijgbaar bij Kruidvat*
- * Kruitvat KV 13 € 2,31 per verpakking ←*
 - * Kruitvat KV 675 € 2,31 per verpakking
 - * Duracell DA 675 € 5,29 per verpakking
- 3) Waardering MATIG:
- * Ucar Air Plus 13 AP € 4,54 per verpakking ←*

Entific Medical Systems adviseert u te allen tijde om batterijen met de waardering ZEER GOED te gebruiken.


Helaas heeft de consumentenbond geen test uitgevoerd naar 9v batterijen. Wel willen wij graag uit eigen ervaring melden dat een batterijlader die tevens batterijen kan ontladen als zeer goed worden ervaren door Cordelle gebruikers. Indien u de batterijen eerst onlaadt voordat u ze opnieuw oplaadt, gaan de batterijen langer mee, en blijft de geluidskwaliteit gedurende de dag constant.

Wat te doen bij:

• Vochtproblemen met uw toestel:

Het kan wel eens gebeuren dat uw toestel spontaan uitvalt. Misschien heeft u in dat geval te maken met vochtproblemen in uw toestel. Deze kunnen ontstaan doordat u bijvoorbeeld in de regen buiten bent geweest, of omdat u door zware lichamelijke inspanningen erg heeft getranspireerd. In dat geval raden wij u aan om uw toestel op een veilige manier te drogen. Wij raden u ten sterkste af om uw toestel op de verwarming te leggen of met bijvoorbeeld een föhn droog te blazen. Om uw toestel toch snel droog te krijgen, zijn er in hoortoestellenwinkels speciale droogmiddelen te koop. Wilt u meer weten over de verschillende soorten droogmiddelen die beschikbaar zijn, loopt u dan eens binnen bij een audicien.

Wat te doen bij andere problemen:

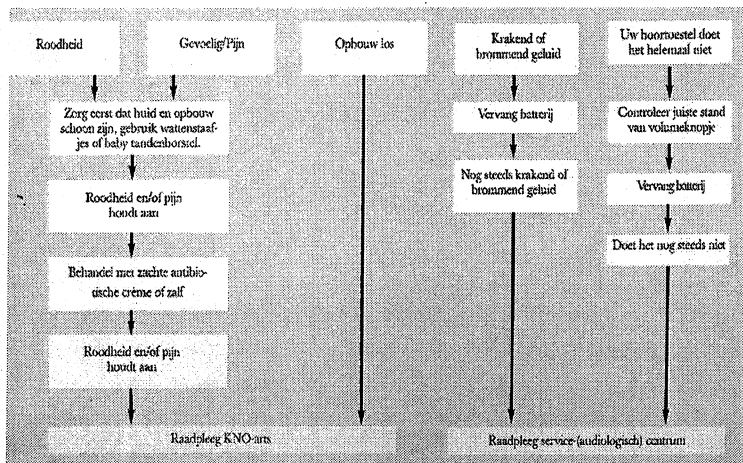

Waarde van uw toestel en de verzekering

Indien u een verzekering tegen verlies en / of diefstal heeft afgesloten voor uw BAHA hoortoestel, let u er dan op dat u voor het juiste bedrag bent verzekerd. Ook bij Entific Medical Systems zijn de prijzen voor BAHA toestellen met ingang van 1 januari 2002 verhoogd. Indien u de verzekering hierover niet inlicht, kan het gebeuren dat u onderverzekerd raakt. Volledigheidshalve zullen wij hieronder de verzekerde waarde per toestel aangeven. Indien u ook verzekeringswaarden van accessoires wenst, kunt u contact opnemen met ons kantoor in Leiden.

- 1) BAHA Compact € 1.833,00 excl. 6% B.T.W.
- 2) BAHA Classic € 1.668,00 excl. 6% B.T.W.
- 3) BAHA Cordelle € 2.350,00 excl. 6% B.T.W.

Entific Medical Systems gaat verhuizen!

Per 15 juli 2002 gaat Entific Medical Systems verhuizen. Vanaf die datum is ons nieuwe adres:

Blauw-roodlaan 152c
2718 SK Zoetermeer
tel: 079-3619280

Postbus 744
2700 AS Zoetermeer
fax: 079-3619274

Natuurlijk zijn wij ook in Zoetermeer weer bereikbaar voor dezelfde service als die u van ons gewend bent.

Vragen aan Entific Medical Systems

Heeft u vragen of opmerkingen over BAHA hoortoestellen, accessoires of andere zaken, neemt u dan gerust contact met ons kantoor in Leiden op. U kunt ons bereiken via telnr: 071-5680930, faxnr: 071-5680944 en via e-mail: info@entific.nl.

Indien u in het vervolg van Entific Medical Systems de nieuwsbrief thuis wilt ontvangen kan dat. Vult u a.u.b. onderstaand strookje in en stuur dit **zonder postzegel** in een open envelop op naar Entific Medical Systems Antwoordnummer 12049, 2300 VC Leiden. Let op of u het nieuwe adres in u deze bon na 15 juli 2002 naar ons opstuurt.

✂-----

Ja, ik wil graag in het vervolg de patiënten nieuwsbrief thuis ontvangen. Met het invullen van deze bon verplicht ik mij verder tot niets.

Naam: _____

Adres: _____

Postcode / Woonplaats: _____

Handtekening: _____

O Graag wil ik alsnog nieuwsbrief nr. 1 ontvangen